

バスチェア

品番：SR-SBC005

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

取扱説明書


⚠ 安全上の警告・注意

- ・本製品を改造しないでください。
- ・本製品の各部に破損または、変質等の異常が見られたときは使用を中止してください。
- ・お湯をはった浴槽内では使用しないでください。製品が浮き上がって転倒したり、パイプに水が入り製品が劣化する恐れがあります。
- ・脚部の破損や転倒の恐れがありますので、座ったままで本製品を引きずらないでください。
- ・勢いよく座ると破損や変形、転倒の恐れがありますので、ゆっくりと腰かけてください。
- ・座面の穴に指等を入れると抜けなくなる恐れがあります。
- ・本製品についた汚れを落とす場合は、中性洗剤を希釈してご使用ください。
- ・踏み台のように本製品の上に立ち上がるなどの行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。


組み立てかた

組立にはプラスドライバーが必要になりますので、予めお手元にご用意ください。


組み立て前に内容物が揃っていることをご確認ください。

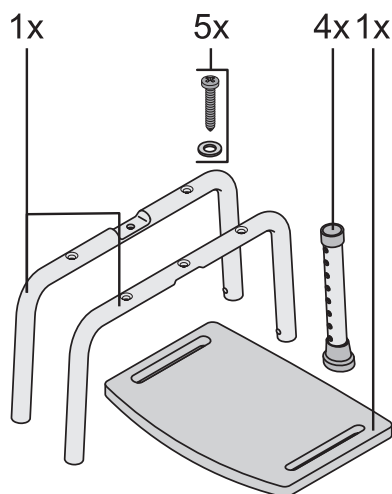


1

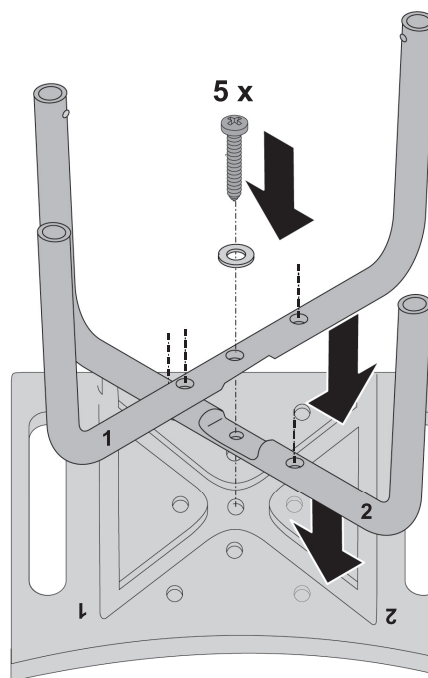

2

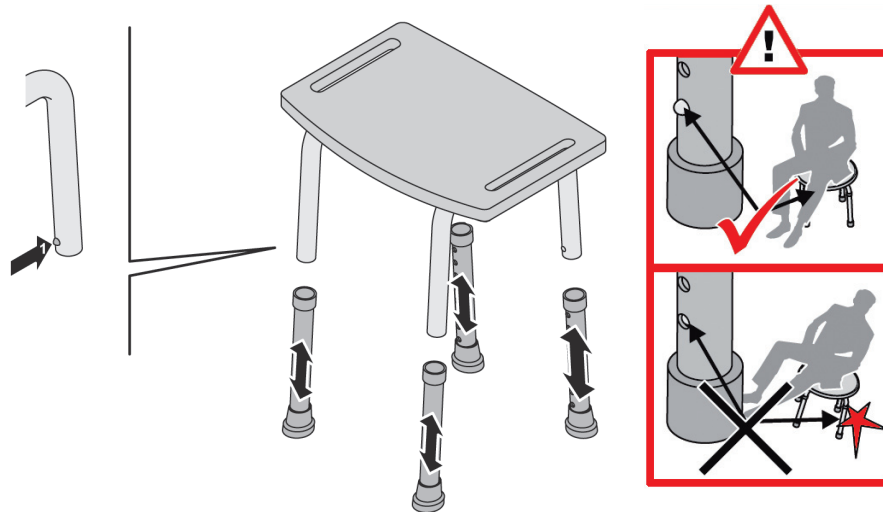

3

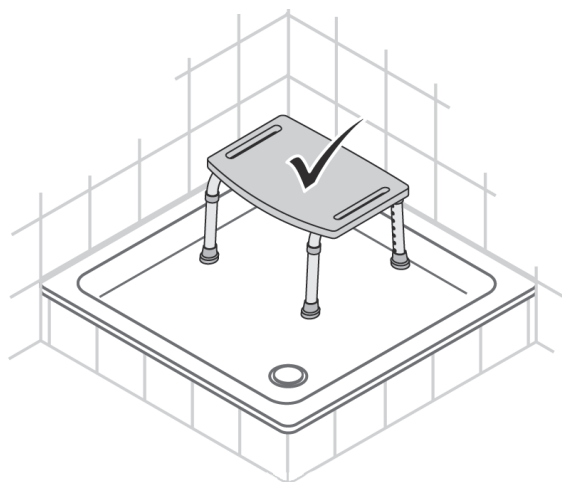

⚠️ ご注意

- かならず、ゆるみやガタつきがないか確認してください。
ゆるみやガタつきがある場合は、取付方法を確認ししっかりと組み立ててください。
- 高さ調節の際は、脚部のスナップボタンを同じ高さになるように固定してください。固定が不完全な場合は本製品が傾き、転倒する恐れがあります。
- スナップボタンがロック穴から大きく飛び出していることを確認してください。
- スナップボタンを深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。その際は、いったんパイプを引き抜き、スナップボタンを出してから、再度調節してください。

保管方法

腐食の原因となりますので、水を切って乾燥させてください。

湿気の少ない場所で保管してください。

※ 保管する前に各部を点検し、異常のないことを確認してください。異常が認められた場合は使用を中止してください。

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

☎️ 0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

<https://www.sunruck.com/>

製品仕様

材質：アルミ、ポリエチレン

サイズ：L44×W50×H39～57cm

高さ：35～53cm