

シャワーチェア 楽々せもたれタイプ 取扱説明書

品番 :SR-SBC019KD


この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

⚠ 安全上の警告・注意


- ◆本製品を改造しないでください。
- ◆本製品の各部に破損または、変質等の異常が見られたときは使用を中止してください。
- ◆お湯をはった浴槽内では使用しないでください。製品が浮き上がって転倒したり、パイプに水が入り製品が劣化する恐れがあります。
- ◆脚部の破損や転倒の恐れがありますので、座ったままで製品を引きずらないでください。
- ◆転倒の恐れがありますので、背もたれに体重をかけすぎないようにしてください。
- ◆勢いよく座ると破損や変形、転倒の恐れがありますので、ゆっくりと腰をかけてください。
- ◆座面の穴に指等を入れると抜けなくなる恐れがあります。
- ◆本製品について汚れを落とす場合は、中性洗剤を希釈してご使用ください。
- ◆踏み台のように本製品の上に立ち上がるなどの行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。

付属品


※はじめにご確認ください。

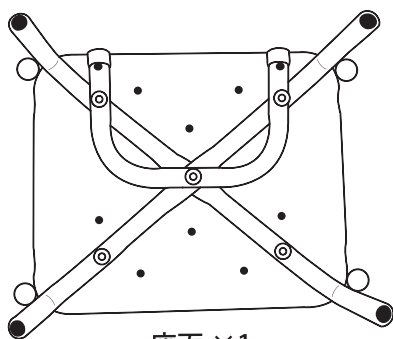


座面 ×1

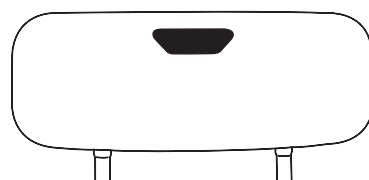


背もたれ ×1

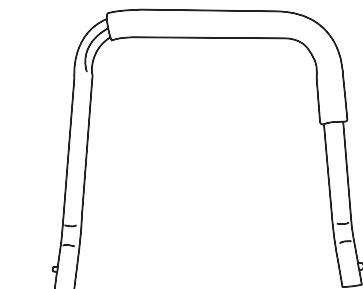

肘かけ(右) ×1

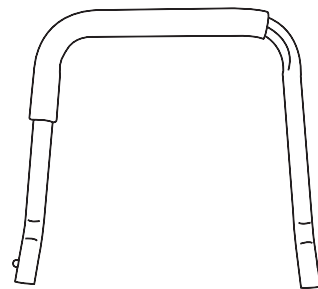


肘かけ(左) ×1

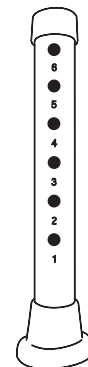

脚 A ×4




脚 B ×4

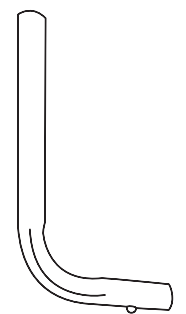

L字パイプ ×2

※脚 A と脚 B が別に表記されておりますが、実際は脚 A の内部に脚 B が入っている状態で梱包されています。

組み立て方

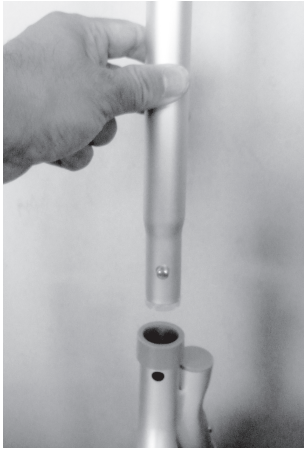

① 座面四隅のパイプ部分全てに、穴の位置を合わせるようにして、脚 B を差し込みます。



② 脚 B に脚 A を差し込み、スナップボタンと、穴の位置を合わせながら、高さを調節します。この時、全ての脚が同じ高さになるよう調節してください。



③ 背もたれのパイプ部分に、L 字パイプを差し込みます。スナップボタンが、しっかり穴から出ていることを確認してください。



④ 背もたれに取り付けた L 字パイプを、座面裏の U 字パイプに差し込みます。U 字パイプの穴から、L 字パイプのスナップボタンが出ていることを確認してください。



⑤ 座面四隅のパイプ部分に、ひじ掛けを取り付けます。スナップボタンが座面四隅のパイプ部分の穴から出るように差し込んでいきます。反対側も同じように取り付けてください。



⑥ 背もたれのスナップボタンと穴の位置を合わせることで高さの調整が可能です。背もたれの高さは 2.5cm ずつ 3 段階まで（最大高低差：約 5cm）に調整可能です。

⚠️ ご注意

- ◆必ず、ゆるみやガタつきがないか確認してください。
- ◆ゆるみやガタつきがある場合は、取付方法を確認ししっかりと組み立ててください。
- ◆高さ調節の際は、脚部のスナップボタンを同じ高さになるように固定してください。固定が不完全な場合は本製品が傾き、転倒する恐れがあります。
- ◆スナップボタンがロック穴から大きく飛び出していることを確認してください。
- ◆スナップボタンを深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。その際は、いったんパイプを引き抜き、スナップボタンを出してから、再度調節してください。

保管方法

- ◆腐食の原因になりますので、水を切って乾燥させてください。
- ◆湿気の少ない場所で保管してください。
- ※保管する前に各部を点検し、異常がないことを確認してください。
- 異常が認められた場合は使用を中止してください。

製品仕様

サイズ：D44×W50×H70～90cm
重量：3.2kg
耐荷重量：100kg
材質：プラスチック、アルミニウム

LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。順番にご対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHSからのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)
<https://www.sunruck.com/>