

警告

- ・改造はしないことまた、分解したり修理をしないこと 正常にはたらかず、けがの原因になります。
- ・製品本体の上に乗ったり、ぶら下がらないこと 製品本体が破損し、けがの原因になります。

注意

- ・使用前にネジのゆるみなど各部に異常がないか点検し使用すること 転倒し、けがの原因になります。
- ・使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店やケアマネジャーなど専門家に相談すること
- ・必ず平坦な場所で使うこと
- ・立ち座りのとき片側の手すりだけに体重をかけないこと 転倒し、けがの原因になります。
- ・子供、幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと
- ・直射日光を避けて、室内のみで使用すること 変色やソリの原因になります。
- ・人や物をのせたまま移動させないこと 故障やけがの原因になります。
- ・体重が 100kg を超える方は使用しないこと 本体が破損する恐れがあります。
- ・次にあげるものではお手入れしないこと

[シンナー][クレゾール][酸、アルカリ性洗剤]

[塩素系薬剤(洗剤)や熱湯(煮沸消毒など)による殺菌、消毒]

[磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの]

製品が劣化し、破損の原因になります。

- ・パイプの穴等から水を入れないこと 内部がさびて破損の原因になります。
- ・高さ調節時に脚部の一番下の穴は使用できません。 手すりフレームのパイプには保護カバーが装着されている為、高さ調節時に脚部の一番下の穴に合わせることはできません。

取り付け可能な便器

●ほとんどの洋式便器に対応


- ・温水洗浄機付きの場合、操作パネルの高さや大きさ、位置によりご使用頂けない場合がございます。

(操作パネルを含めた幅が57cm以内であればご使用頂けます)

●取り付けの条件

床が老朽化しておらず、便器が床にしっかり固定されていることをご確認ください。

部材一覧

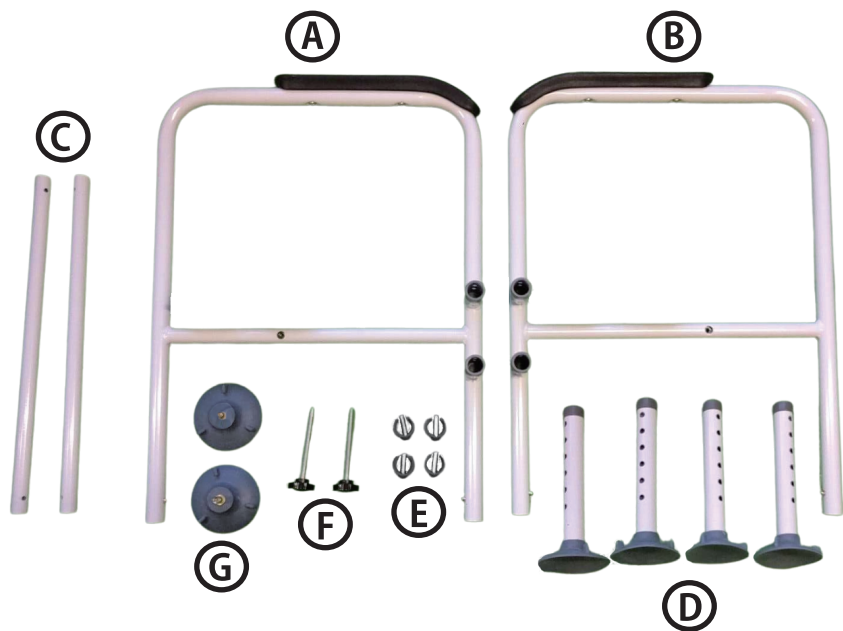

- A : 手すりフレーム (左) ×1
- B : 手すりフレーム (右) ×1
- C : パイプ ×2
- D : 脚部 ×4
- E : U型ピン ×4
- F : ネジ ×2
- G : 吸盤 ×2


組み立て方

1. 手すりフレームに脚部を取り付ける



- 【D : 脚部】を【A と B の手すりフレーム】へ挿し込み、取り付けます。
- 【D : 脚部】の5つの穴からお好みの高さに合わせて取り付けてください。
- ※【D : 脚部】の一番下の穴はご使用できません。

2. 手すりフレームにパイプを取り付ける

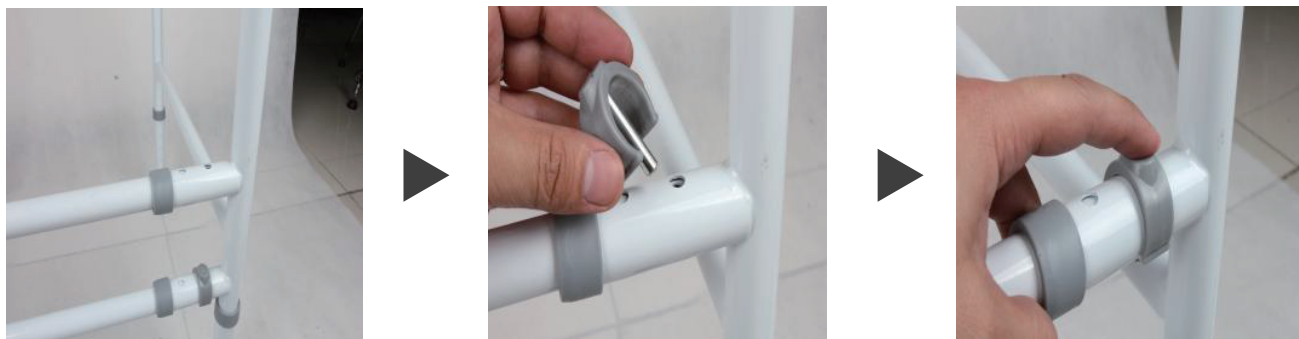

- 【C : パイプ】2本を【A と B の手すりフレーム】へ挿し込みます。
- 手すりフレームとパイプの穴を合わせて【E : U型ピン】を挿し込んで固定します。
- ※挿入時、挿入しづらい時は、パイプをフレームの受け部分に対して斜めに挿入するなどしてはめ込んでください。

3. 吸盤を取り付けてトイレにロックする



【F：ネジ】を手すりフレームの側面の穴から挿し込み、【G：吸盤】を取り付けます。
【F：ネジ】を回して【G：吸盤】をトイレにロックする。

4. 完成



製品仕様

品名	トイレ用手すり
品番	SR-SCC040
サイズ (約)	幅 57 ~ 62 × 奥行 47 × 高さ 71.5 ~ 82cm
重量 (約)	6kg
耐荷重量 (約)	100kg
材質	鉄

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00 ~ 12:15、13:15 ~ 17:00 月~金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)
<https://www.sunruck.com/>

LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。順番にご対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。