

# ひじかけ付シャワーチェア 取扱説明書

品番 :SR-SBC018KD

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。



安全にご使用いただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

本製品は家庭用の浴室用チェアとなります。それ以外の用途では使用しないでください。

EM20250714A1

## 安全上の警告・注意















- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示内容を無視して間違った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b> 「死亡や重症などを負う可能性が想定される」内容です。		<b>注意</b> 「障害や物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
---	--------------------------------------	---	--

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分しています。

	してはいけない「禁止」内容です。		必ず実行していただく「強制」内容です。
---	------------------	---	---------------------

### 警告

	本製品を改造したり修理や部品の代用品は使用しないでください。		本製品の各部に破損または、変質等の異常が見られたときは使用を中止してください。
	お湯をはった浴槽内では使用しないでください。製品が浮き上がって転倒したり、パイプに水が入り製品が劣化する恐れがあります。		脚部の破損や転倒の恐れがありますので、座ったままで製品を引きずらないでください。
	転倒の恐れがありますので、背もたれに体重をかけすぎないようにしてください。		勢いよく座ると破損や変形、転倒の恐れがありますので、ゆっくりと腰をかけてください。
	踏み台のように本製品の上に立ち上がるなどの行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。		座面の穴に指等を入れると抜けなくなる恐れがあります。
	座面の上に立ったり脚をかけたり飛び乗ったりしないでください。転倒してケガをするおそれがあります。		体重が100kgを越える方は使用しないでください。本体が破損しケガをするおそれがあります。
	浴室の洗い場以外で使用しないでください。転倒してケガをするおそれがあります。		座面の中央以外に座らないでください。座面のフチに座る、背もたれに座るなど座面中央以外に座ると、製品が破損したり転倒してケガをするおそれがあります。
	4脚とも同じ高さに調整してください。本体が不安定になり転倒しケガをするおそれがあります。		浴室床の、平らで安定した場所に置いて使用してください。不安定な場所に置くと転倒してケガをするおそれがあります。
	座面が水平となっていることを確認して使用してください。水平でない状態で使用すると本体が不安定となり、転倒してケガをするおそれがあります。		背もたれを手すり代わりにして身体を支えたりしないでください。本体が転倒し、ケガをするおそれがあります。また、部品が外れて転倒してケガをするおそれもあります。

### 注意

	火気に近づけないでください。火災や変形の原因となります。		サウナで使用しないでください。本体が破損したりやけどの原因となります。
	定期的にネジのゆるみなど各部に異常がないか点検してください。本体が正常にはたらかず破損またはケガをするおそれがあります。		ご使用前、ご使用後は床やシャワーチェアについた石鹸やシャンプーを洗い流してください。石鹸やシャンプーがついてるとすべりやすく、転倒してケガをするおそれがあります。
	タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しないでください。プラスチック部分の変色または破損しケガをするおそれがあります。		本製品についた汚れを落とす場合は、中性洗剤を希釈してご使用ください。

# 使用上の注意

- ◆必ず、ゆるみやガタつきがないか確認してください。
- ◆ゆるみやガタつきがある場合は、取付方法を確認ししっかりと組み立ててください。
- ◆高さ調節の際は、脚部のスナップボタンを同じ高さになるように固定してください。固定が不完全な場合は本製品が傾き、転倒する恐れがあります。
- ◆スナップボタンがロック穴から大きく飛び出していることを確認してください。
- ◆スナップボタンを深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。その際は、いったんパイプを引き抜き、スナップボタンを出してから、再度調節してください。

# 保管方法

- ◆腐食の原因になりますので、水を切って乾燥させてください。
- ◆湿気の少ない場所で保管してください。
- ※保管する前に各部を点検し、異常がないことを確認してください。
- 異常が認められた場合は使用を中止してください。

## 製品仕様

製品名：シャワーチェア  
製品型番：SR-SBC018KD  
製品サイズ：高さ約 73cm ~ 85cm、  
横幅約 43cm、縦幅約 42cm、  
座面高さ約 42cm ~ 54cm  
製品重量：約 3.2kg  
耐荷重量：約 100kg  
材質：ポリエチレン、アルミ、足先ゴム製

## サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

**e-mail: support@sunruck.com**

受付時間：10:00 ~ 12:15、13:15 ~ 17:00 月~金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)  
<https://www.sunruck.com/>


## LINE からお問い合わせ




QR コードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。順番にご対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。

# セット内容

※はじめにご確認ください。

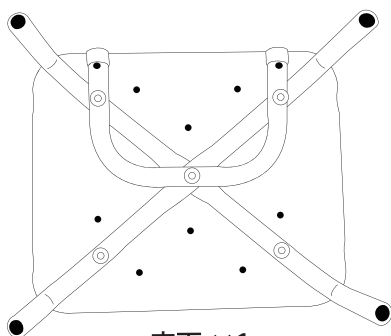


座面 ×1


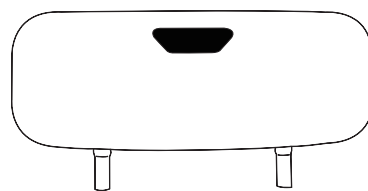


背もたれ ×1


連結パーツ ×4

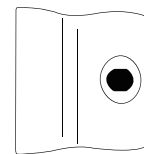


専用ネジ ×8

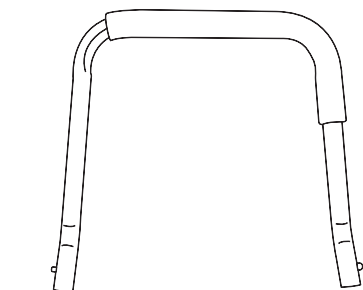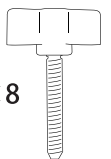

肘かけ (右) ×1

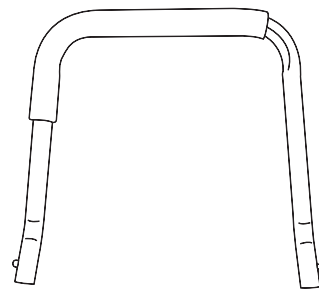


肘かけ (左) ×1

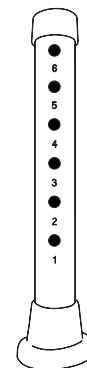

脚 A ×4




脚 B ×4

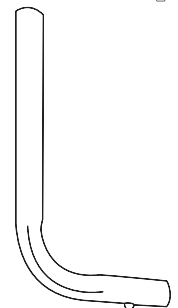


L字パイプ ×2

※脚 A の内部に脚 B が入っている状態で梱包されています。


# 組み立て方

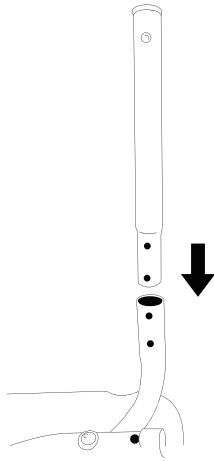

- ① 座面四隅のパイプ部分全てに、穴の位置を合わせるようにして、脚 B を差し込みます。

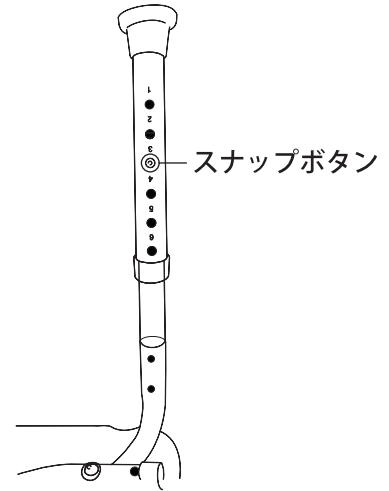


- ② 脚 B に脚 A を差し込み、スナップボタンと、穴の位置を合わせながら、高さを調節します。この時、全ての脚が同じ高さになるよう調節してください。

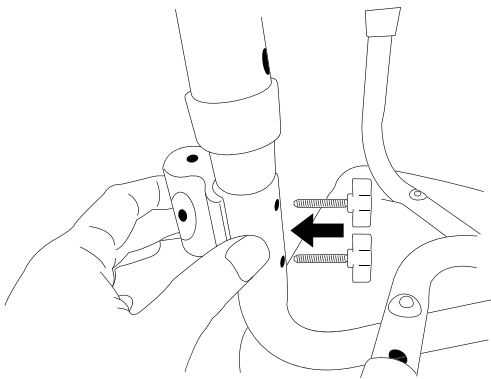


- ③ 座面四隅のパイプと脚 B の穴を合わせた部分に、連結パーツを取り付けます。反対側の穴からネジを差し込み、連結パーツを固定します。



- ④ 背もたれのパイプ部分に、L 字パイプを差し込みます。スナップボタンが、しっかり穴から出ていることを確認してください。

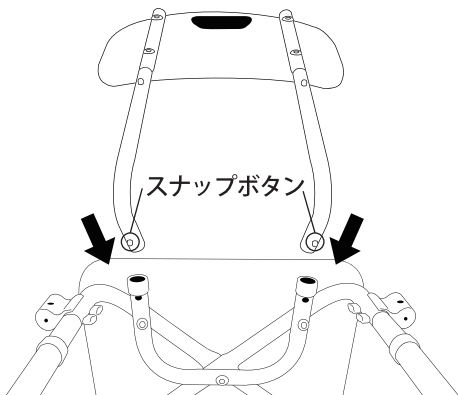

- ⑤ 背もたれに取り付けた L 字パイプを、座面裏の U 字パイプに差し込みます。U 字パイプの穴から、L 字パイプのスナップボタンが出ていることを確認してください。

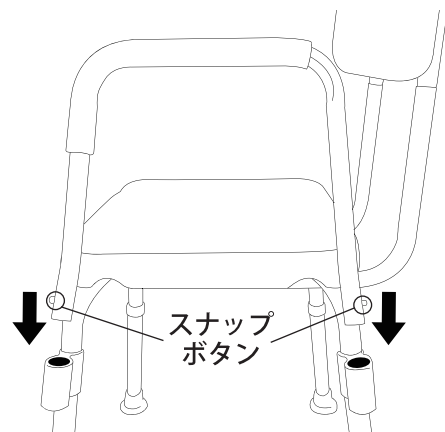

- ⑥ 連結パーツに、肘かけを取り付けます。スナップボタンが連結パーツの穴から出るように差し込んでいきます。反対側も同じように取り付け、完成となります。